


OBSAH

OBSAH.....	17
POPIS PRODUKTU.....	18
ZOSTAVENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY	20
ÚČEL POUŽITIA.....	22
POŽIADAVKY NA OBSLUHU.....	22
USKLADNENIE.....	22
TYP PREVÁDZKY	22
OBMEDZENIE PREVÁDZKY	22
ÚDRŽBA A UPOZORNENIA	23
PORUCHY A ICH ODSTRÁNENIE.....	24
ZÁRUKA	25
ŠPECIFIKÁCIA	26
NEVYHNUTNÉ INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA	27
VYHLÁSENIE O ZHODE.....	28
SERVIS.....	29
ÚDAJE O VÝROBCOVI.....	30

POPIS PRODUKTU




- 1 Vypínač
- 2 Regulátor intenzity osvetlenia
- 3 Pohyblivýpodstavec
- 4 Zásuvka pro optický kábel
- 5 Optické káble (REF B.0354 autoklávovateľný)

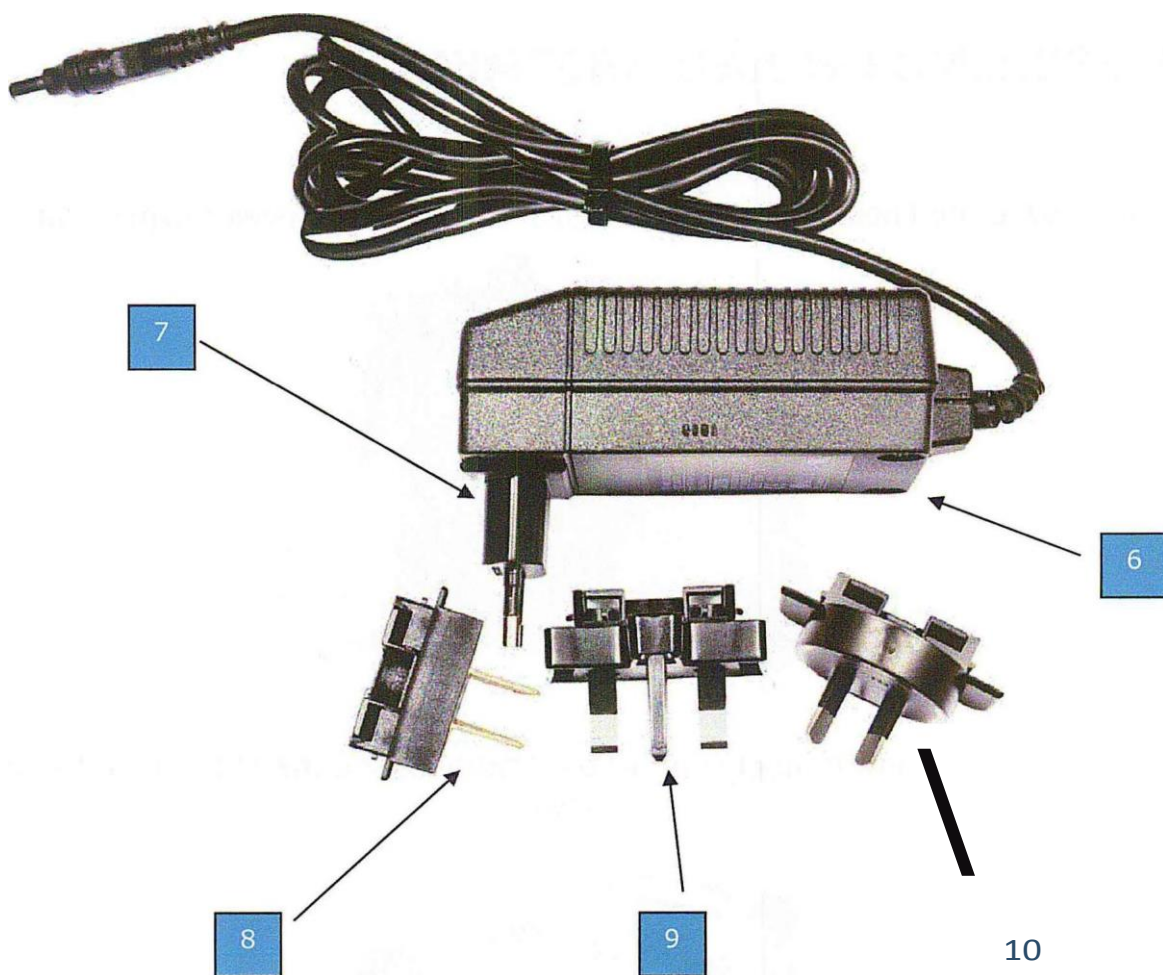

- 6 Elektrický zdroj
- 7 zástrčka EU
- 8 zástrčka US/JPN
- 9 zás. UK
- 10 zástrčka AUS/NZ

SESTAVENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Vyberte správnu zástrčku a zasuňte ju do elektrického zdroja;

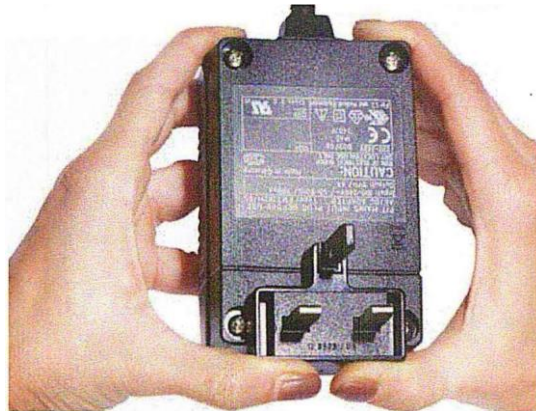


- Pomocou kábla pripojte generátor svetla Ecolite k elektrickému zdroju;



- Zasuňte optický kábel do zásuvky na generátore Ecolite;



- Zasuňte elektrický zdroj do siete;
- Zapnite vypínač (1). Svietača zelená kontrolka znamená, že prístroj je pod prúdom
- Pomocou regulátora (2) nastavte potrebnú intenzitu osvetlenia 1 až 6
- V prípade potreby vymeňte typ zástrčky vysunutím a opätovným nasunutím do elektrického zdroja

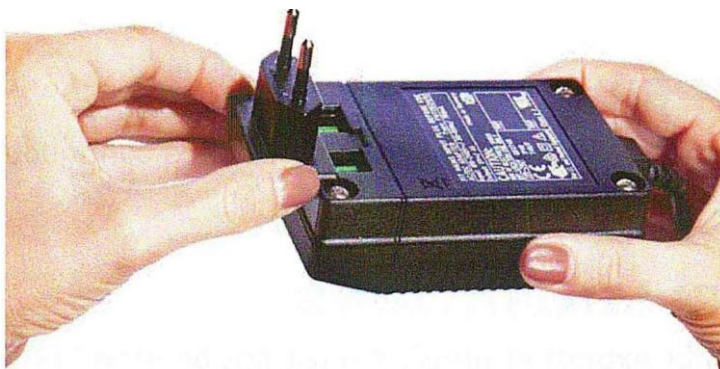

ÚČEL POUŽITIA

Generátor svetla Ecolite je určený pre osvetlenie anoskopov a rektoskopov Sapi Med pomocou optického kábla.

Systém pracuje na báze technológie LED umožňujúcej významnú úsporu energie.

Svetelný výkon Ecolite je porovnateľný s 100 W halogénovou žiarovkou pri spotrebe energie iba 18 W.

POŽIADAVKY NA OBSLUHU

Obsluha generátora svetla Ecolite musí preštudovať návod na použitie a porozumieť funkcii a podmienkam použitia prístroja.

USKLADNENIE

Generátor svetla Ecolite ukladajte horizontálne na suchom, bezprašnom a bezpečnom mieste.

TYP PREVÁDZKY

Generátor svetla Ecolite je určený na trvalú prevádzku podľa potreby.

OBMEDZENIE PREVÁDZKY

Systém nie je určený do výbušného prostredia, nepoužívajte v blízkosti horľavých látok (anestetiká ap.)

Nevystavujte generátor svetla Ecolite pôsobeniu poveternostných podmienok.

Používajte iba v prípadoch presne špecifikovaných odborným zdravotníckym personálom.

ÚDRŽBA

- **Ecolite**: Prístroj odpojte od siete a očistite ľahko navlhčeným mäkkým obrúskom.
- Neautoklávovateľný optický kábel (B.0351): očistite mäkkým obrúskom navlhčeným vhodným dezinfekčným prípravkom. Neponárajte do tekutiny.
- Autoklávovateľný optický kábel (B.0354): možno sterilizovať v autokláve pri teplote 134°C po dobu 3 minút alebo ponoriť do dezinfekčných roztokov na báze amónnych solí.

UPOZORNENIE

- V priebehu prevádzky umiestnite prístroj na dobre vetranom mieste.



Chráňte oči pred priamym pôsobením svetla zo zásuvky na generátore alebo z optického kábla.

PORUCHY A ICH ODSTRÁNENIE

- *Zelená kontrolka svieti, prístroj je zapojený do siete, ale negeneruje svetlo.*

Príčina:

- Porucha na LED = potrebný servis
- Porucha na vnútornom obvode = potrebný servis

- *Prístroj negeneruje svetlo, zelená kontrolka nesvieti.*

Skontrolujte:

- Správne pripojenie sieťového kábla do zásuvky
- Správne pripojenie zdrojového kábla do prístroja
- Prúd v sieti

Príčina:

- Porucha na sieťovom zdroji = potrebný servis

- *Prístroj generuje svetlo, zelená kontrolka nesvieti.*

Príčina:

- Porucha na vnútornom obvode = potrebný servis

PRE NEVYHNUTNÚ KONTROLU ALEBO SERVIS ODOVZDAJTE PRÍSTROJ DODÁVATEĽOVI

Versium, s.r.o.
Trenčianska 47
821 09 Bratislava
Tel: 02/ 50 100 993
info@versium.sk

ZÁRUKA

- Na výrobné chyby generátora svetla Ecolite a optického kábla sa vzťahuje záruka v dĺžke 12 mesiacov. Záručná doba sa začína dňom odovzdania zákazníkovi. Záruka nepokrýva chyby alebo poškodenia vzniknuté neodborným používaním alebo skladovaním.

ŠPECIFIKÁCIA

- **Ecolite** generátor svetla: REF B.0300
- Optický kábel: REF B.0351
- Autoklávovateľný optický kábel: REF B.0354
- Sieťový zdroj: 110/240 V; 1A; 50/60Hz
- LED zdroj: 6,500 K (teplota chromatičnosti)
- Priemerná životnosť LED: 60,000 hodín
- **Ecolite** rozmery (v x d x š): 90 x 174 x 197 mm
- Hmotnosť: 1 kg

Výrobca: Sapi Med S.p.A., Via della Chimica, 6, Zona Ind. D3 - 15121 Alessandria, Taliansko

SPECIFICATIONS MPP 30 MEDICAL POWER SUPPLY

- Input: **100 - 240 V; 50 - 60 Hz**
- Output: **5V**
- Efficiency: **80%**
- Dimensions for power supply (HxWxD): **105x68x39mm**
- Weight: **248 gr.**
- Safety Specification: **IEC 60601-1 e UL 2601; IEC 61000**
- Plug connector exchangeable mains plug system: **AC input EURO, UK, USA/ Japan, Australia, ROW**